

Contient 2 flacons : lave oeil vert 500 ml et solution pH neutral 200 ml.

Le lave-œil Plum vert permet de rincer de votre œil les corps étrangers comme la poussière et la saleté, tandis que le pH Neutral bleu neutralise les produits acides et alcalins

**Utilisation :** pour un lavage oculaire des saletés et impuretés ayant pénétrés l'œil. Pivoter l'œillère sur elle-même, applique sur l'œil et presser le flacon, tête en avant ou en arrière. Vider le contenu.



### **CARACTÉRISTIQUES :**

Station murale ouverte contenant deux flacons PLUM : chlorure de sodium stérile 0,9 % et pH Neutral : tampon phosphate 4,9 %. La station se fixe facilement dans tous les endroits qui nécessitent un rinçage des yeux immédiat.

### **CONSEIL :**

Après utilisation du pH Neutral, nous recommandons de continuer le rinçage avec le lave-œil Plum.

### **ATTENTION :**

Tous les flacons PLUM sont à usage unique. Lorsque l'œillère a été percuté, le flacon ne peut être gardé et ré-utilisé ultérieurement.

### **CERTIFICATION :**

Certificat CE & EN 15154

### **PÉREMPTION :**

36 mois

