


Coffret mural lave-œil en polystyrène résistant aux chocs et ne nécessitant aucun entretien. Il facilite l'accès immédiat aux premiers-soins en cas d'accident oculaire.

Contient 2 flacons de 200 ml de solution pH neutral.

Utilisation : neutralise rapidement et efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts. Pivoter l'œillère sur elle-même, appliquer sur l'œil et presser le flacon, tête en avant ou en arrière. Vider le contenu.

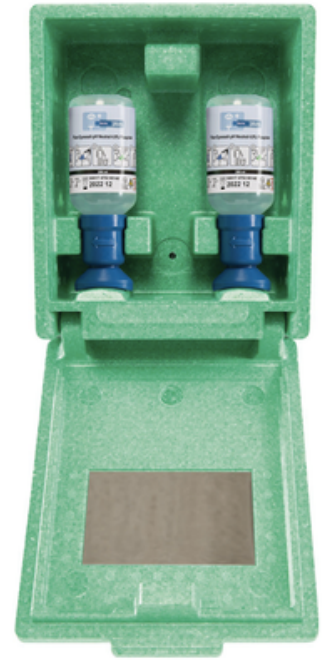

CARACTÉRISTIQUES :

Station murale fermée contenant deux flacons pH neutral Plum de 200 ml, c'est un tampon phosphate stérile à 4,9 % qui neutralise rapidement les acides et bases. La station se fixe facilement dans tous les endroits qui nécessitent un rinçage des yeux immédiat.

CONSEIL :

Après utilisation du pH Neutral, nous recommandons de continuer le rinçage avec le lave-œil Plum

ATTENTION :

Tous les flacons PLUM sont à usage unique. Lorsque l'œillère a été percuté, le flacon ne peut être gardé et ré-utilisé ultérieurement.

CERTIFICATION :

Certificat CE

PÉREMPTION :

36 mois

