

Contient 2 flacons de 500 ml de solution saline (chlorure de sodium 0,9 %)

Utilisation : pour un lavage oculaire des saletés et impuretés ayant pénétrés l'œil. Pivoter l'œillère sur elle-même, appliquer sur l'œil et presser le flacon, tête en avant ou en arrière. Vider le contenu.

Usage unique : n'utiliser donc que une seule fois.

Temps de Lavage : env. 10 minutes



CARACTÉRISTIQUES :

Station murale ouverte contenant deux flacons Lave-œil Plum de 500 ml. Spécialement adaptée aux endroits propres, salles blanches, labos. La station est pourvue d'un pictogramme et d'un miroir.

CONSEIL :

Sortir le flacon, tourner l'œillère, appliquer sur l'œil contaminé en pressant doucement le flacon.

ATTENTION :

Tous les flacons PLUM sont à usage unique. Lorsque l'œillère a été percuté, le flacon ne peut être gardé et ré-utilisé ultérieurement.

CERTIFICATION :

Certificat CE & EN 15154

PÉREMPTION :

36 mois

